



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			POP N° 47	Data: 04/06/2012
			Revisão N° 4	Data: 02/01/2025
Título: Limpeza de Equipamentos - Autoclave			Área de Aplicação: Central de Material e Esterilização (CME)	
Responsáveis	Nome	Cargo		
Elaboração	Rosangela Pinheiro Pinto	Coordenadora de Enfermagem da CME		
Revisão	Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Assessoria de Planejamento, Supervisão e Cuidado		
Aprovação	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves	Diretora de Enfermagem		

1. EXECUTANTE

1.1 Compete ao profissional da equipe de enfermagem realizar a remoção da sujidade visível da autoclave, mediante uso de água e sabão líquido de PH neutro (parte interna) e ao colaborador da equipe de higienização hospitalar lotado na CME (parte externa)

2. RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Manter o equipamento limpo para receber o material que será esterilizado para garantir condições adequadas de funcionamento, deixando-o livre de substâncias que possam interferir no processo.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

3.1 EPI (gorro, luvas de procedimentos, óculos de proteção, avental, sapato fechado impermeável).

3.2 Recipiente plástico.

3.3 Água.

3.4 Sabão líquido de PH neutro.

3.5 Esponja.

3.6 Pano úmido limpo.

3.7 Pano seco limpo.



4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- 4.1 Utilizar EPI (gorro, luva de procedimentos, sapato fechado impermeável, óculos de proteção, avental).
- 4.2 Verificar se o equipamento está frio e desligado (porta do equipamento aberta, chave liga/desliga na posição desliga).
- 4.3 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos).
- 4.4 Calçar luvas de borracha.
- 4.5 Embeber esponja com sabão líquido.
- 4.6 Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido.
- 4.7 Remover o sabão líquido com pano limpo umedecido em água limpa.
- 4.8 Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão.
- 4.9 Secar com pano limpo e seco.
- 4.10 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das mãos).
- 4.11 Repetir procedimento na parte externa do equipamento (EHH)

5. CUIDADOS

- 5.1 Utilizar a haste metálica para alcançar a parte mais profunda da autoclave com maior facilidade.
- 5.2 Diariamente antes da primeira carga do dia.

6. REFERÊNCIAS

- 1. BARILLI, A.L.A.; NASCIMENTO G.M.; PEREIRA, M.C.A., et.al. **Manual de qualificação de esterilização em autoclaves** - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SMS/CCII/SUS – SP 2009.
- 2. SIMONE B.N.A. **Atualização em limpeza, desinfecção e esterilização – micobactéria, apresentação.** COREN SP. 2009. Disponível em: http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Atualizacao_em_Limpeza_Desinfeccao_e_Esterilizacao_Micobacteria.pdf
- 3. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização.** Barueri, SP: Manole, 1º ed 2011/reimpressão 2014.



4. SOBECC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde. 7. ed. São Paulo: SOBECC, 2017

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES			
DATA	VERSÃO	ELABORAÇÃO/REVISÃO	APROVAÇÃO
04/06/2012	1	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida	Gustavo Dias da Silva
06/09/2016	2	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
13/04/2021	3	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
02/01/2025	4	Jaqueline Souza da Silva Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves