

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP N° 55	Data: 05/08/2012
		Revisão N° 4	Data: 02/01/2025
Título: Limpeza de Equipamentos - Lavadora Ultrassônica		Área de Aplicação: Central de Material e Esterilização (CME)	
Responsáveis	Nome	Cargo	
Elaboração	Rosangela Pinheiro Pinto	Coordenadora de Enfermagem da Central de Material e Esterilização	
Revisão	Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Assessoria de Planejamento, Supervisão e Cuidado	
Aprovação	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves	Diretora de Enfermagem	

1. EXECUTANTE

1.1 Compete ao Técnico de Enfermagem a remoção da sujidade visível (orgânica e inorgânica) da lavadora ultrassônica mediante uso de água e sabão líquido de PH neutro (partes internas) e ao colaborador da equipe de higienização hospitalar lotado na CME (parte externa)

2. RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Manter o equipamento limpo para receber o material que será lavado, garantindo condições adequadas de funcionamento, deixando-o livre de substâncias que possam interferir no processo de limpeza.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

3.1 EPI (gorro, máscara, luva de borracha cano longo, óculos de proteção, avental impermeável de manga longa e sapato impermeável fechado).

3.2 Água.

3.3 Sabão líquido de PH neutro.

3.4 Esponja não abrasiva

3.4 Pano de limpeza multiuso.

3.5 Pano úmido limpo.

3.6 Pano seco limpo.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- 4.1 Utilizar o EPI (gorro, máscara, óculos de proteção, avental impermeável de manga longa e sapato fechado impermeável antiderrapante)
- 4.2 Verificar se o equipamento está frio e desligado (Led apagado no painel frontal da lavadora).
- 4.3 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos).
- 4.4 Calçar luvas de borracha.
- 4.5 Retirar os cestos da lavadora.
- 4.6 Lavar os cestos separadamente com esponja não abrasiva embebida em sabão líquido.
- 4.7 Enxaguar os cestos em água corrente.
- 4.8 Colocar os cestos para escorrer sobre bancada forrada com pano seco limpo.
- 4.9 Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido de PH neutro utilizando pano de limpeza multiuso.
- 4.10 Remover o sabão líquido com pano limpo umedecido em água limpa.
- 4.11 Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão.
- 4.12 Secar com pano seco e limpo.
- 4.13 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos).
- 4.14 Repetir procedimento na parte externa do equipamento (colaborador da EHH)

5. CUIDADOS

- 5.1 Ao enxaguar os cestos da lavadora em água corrente, o uso de óculos de proteção e avental é essencial a fim de evitar que aerossóis atinjam o profissional que executa o procedimento.
- 5.2 Deve ser realizada diariamente, pela manhã, antes da lavagem do primeiro material recebido e sempre que for feita a troca da solução enzimática por excesso de sujidade.

6. REFERÊNCIAS

- 1. POSSARI, J. F, **Centro de Material e Esterilização: Planejamento, Organização e Gestão**. 4ª ed. SP, 2011.
- 2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SP: Manole, 1º ed 2011/reimpressão 2014

3. FREIBERGER, M.F. **Processo de Trabalho em Central de Material e Esterilização** – FAEMA. SC, 2011. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/54315923/Apostila-de-Processo-de-Trabalho-Em-Central-de-Material-Esterilizado>
4. SOBECC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde. 7. ed. São Paulo: SOBECC, 2017

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES			
DATA	VERSÃO	ELABORAÇÃO/REVISÃO	APROVAÇÃO
05/08/2012	1	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida	Gustavo Dias da Silva
04/07/2017	2	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
08/04/2021	3	Rosangela Pinheiro Pinto/ Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
02/01/2025	4	Jaqueline Souza da Silva Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves